

Procédure pour remplacer le flextor

1. Outils nécessaires

- Chasse goupille conique 2 mm
- Une pince crocodile
- Un Marteau ou un maillet en plastique



2. Opérations

a) Extraire les 2 goupilles

- Utiliser le chasse goupille conique 2mm : le placer dans le trou de 2,4 mm à l'intérieur de la plaque d'aluminium du low-tech.
- Frappez le chasse goupille de 2mm avec le marteau. Regardez la goupille dehors sur la 2ème photo




Note : le flexor est un modèle small (2 bandes) sur cette photo.

Extraire la goupille avec la pince crocodile



b) Monter le flexor

- Engager les 2 goupilles moletées avec la partie moletée à l'extérieur.
- Placer le flexor et veiller à introduire la goupille à l'intérieur du flexor.
- Poussez la goupille avec le maillet en plastique. Vous pouvez utiliser le chasse goupille si vous voulez. Poussez complètement les goupilles jusqu'à ce qu'elles soient complètement à l'intérieur des trous.

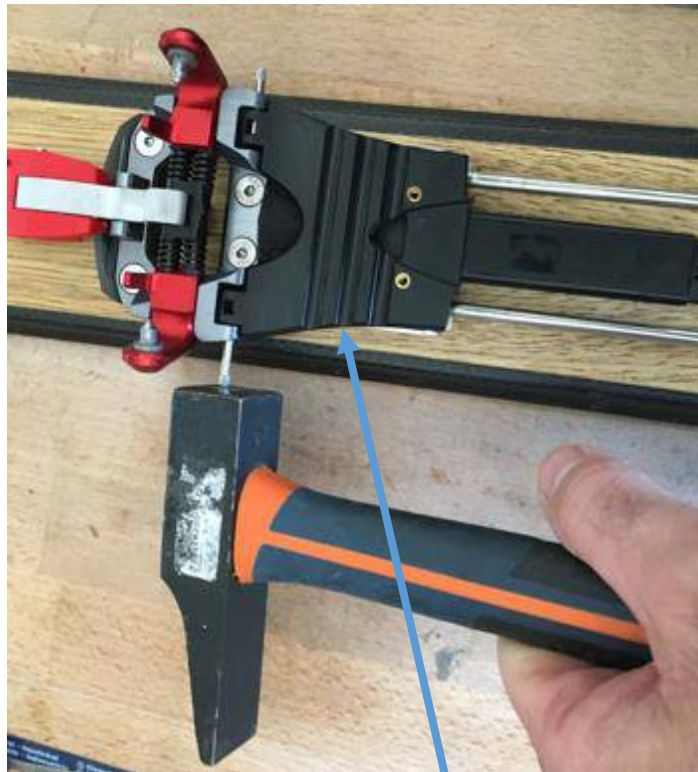

Note : Sur la photo, le flexor est un modèle large (3 bandes)